

La
Rivoluzione
nel rimodellamento del corpo.

Ener
MEDICA



 **Z E R O N A**[®]
Non-Invasive Body Slimming

Perché ZERONA®?

Dalla Teoria alla Terapia

- “ ZERONA® è SICURO e basato su un laser a bassa potenza con ricerca e storia alle spalle...10 anni
- “ Ideato inizialmente ed approvato dalla FDA (Food and Drug Administration Americana) per essere utilizzato durante interventi di liposuzione
- “ UNICO strumento non invasivo ritenuto sicuro ed efficace per la riduzione della circonferenza di vita, fianchi e cosce (30 Agosto, 2010)
- “ Strumento innovativo e primo nel suo genere, ZERONA è stato sottoposto al processo di approvazione FDA 510K attraverso una procedura DE NOVO
- “ Testato attraverso uno studio clinico in doppio cieco, randomizzato, multicentro e con gruppo di controllo (placebo)
- “ I pazienti hanno perso un media di 10 cm. da vita, fianchi e cosce dopo un ciclo da 6 a 10 trattamenti

Il sapere porta alla fiducia....

Tecnologia Campione

IFatti

” Specifiche:

- ✓ Configurazione 5-3 b Line
- ✓ Moduli Generati da Laser a Diodi
- ✓ Lunghezza d'Onda: 635 nm
- ✓ Programmi: Presettati, Sicuri



Il sapere porta alla fiducia....

Chi è il paziente adatto a ZERONA®?

“ **Virtualmente tutti!**

- ✓ NESSUN EFFETTO COLLATERALE NOTO
- ✓ I pazienti vengono trattati in sicurezza sin dalla giovane età fino agli 80 anni e oltre
- ✓ Pazienti con patologie note non dovrebbero essere trattati
- ✓ **Pazienti che si impegnano alla compliance**

Il Paziente ZERONA®

” Controindicazioni

- ✓ Tumore *attivo o entro un anno dalla guarigione*
- ✓ Patologie Cardiovascolari
- ✓ Patologie del Sistema Linfatico
- ✓ Patologie Epatiche o Biliari
- ✓ Pazienti con Organi Trapiantati
- ✓ Pacemaker
- ✓ Gravidanza o Allattamento
- ✓ Pazienti in regime di Anti Infiammatori (o cortisone)
- ✓ Grasso Viscerale

Il Paziente ZERONA®

“ Altri Criteri che Assicurano Risultati Positivi

- ✓ Solo pazienti che **NON** abbiano patologie metaboliche (*es. Iper o Ipo tiroidismo*)
- ✓ Solo pazienti che aderiscono a terapie mediche implementate **ipertensione e colesterolo alto**
- ✓ Regolarsi con il **ciclo mestruale**...se il paziente mostra sintomi di ritenzione d'acqua, spostare l'inizio del ciclo di trattamenti e delle misurazioni finali

Il Paziente ZERO

“ Caratteristiche del Tessuto Adiposo ed Efficacia

✓ *Più efficace sul grasso sottocutaneo*

“ Più vicino alla superficie, più morbido e più facile da perdere

✓ *Non efficace sul grasso viscerale*

“ Più profondo, intra-addominale, grasso duro che circonda gli organi


✓ *Ci vuole più tempo sul grasso che si trova in aree fibrose*

“ Aree dove il flusso ematico è compromesso, donne che hanno una fisionomia a pera e con cellulite




“ Corpi massicci, con grasso che contorna la muscolatura, non morbido come il grasso sottocutaneo

Come Funziona ZERONA®?


- “ Il Laser emulsifica o “scioglie” le cellule adipose
- “ Fa in modo che trigliceridi ed Acidi Grassi vengano secreti dalle cellule
- “ Le cellule adipose “rigide” si svuotano in sicurezza

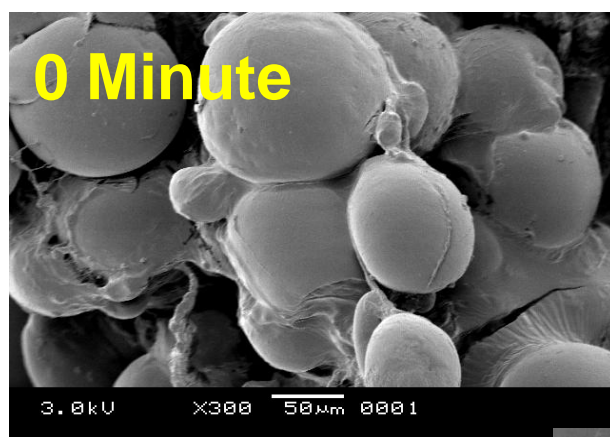

Cellule Adipose Piene

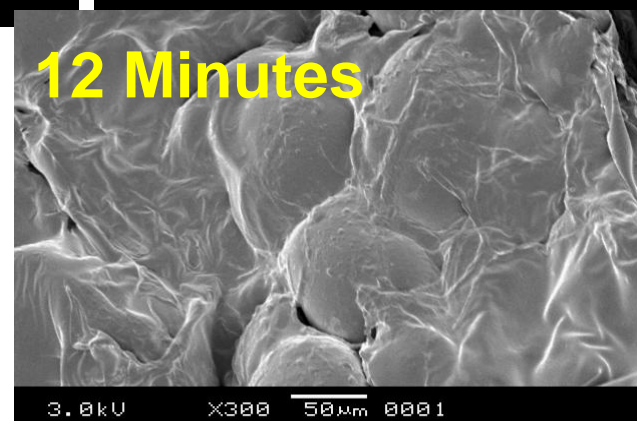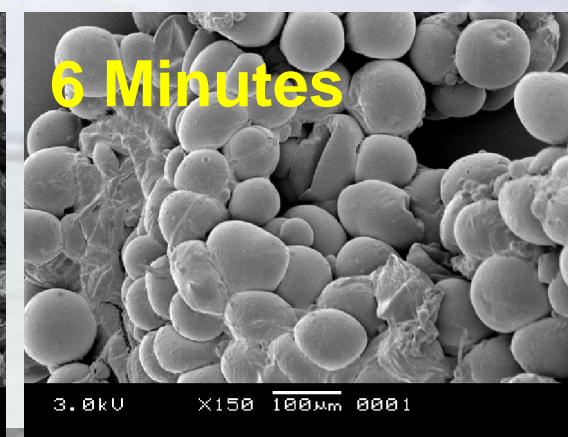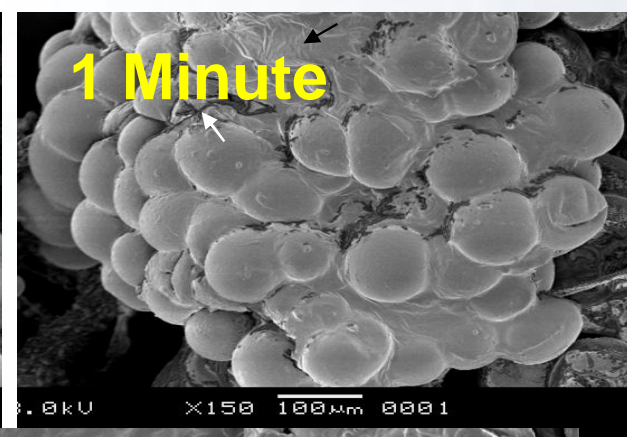

Gocce di Adipe escono dalla membrana dell'Adipocita

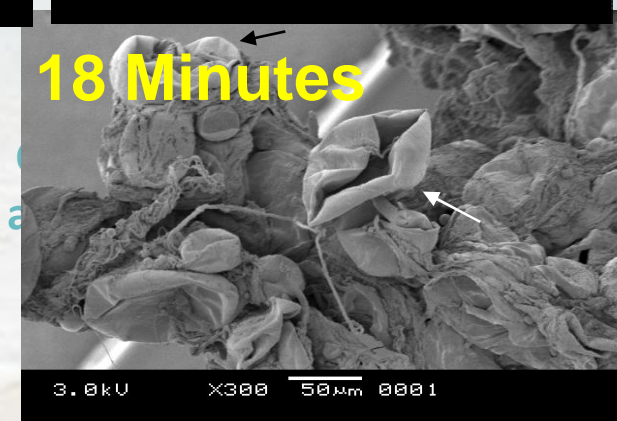

Cellule Adipose Svuotate e Collassate

Come ottimizzare i trattamenti ZERONA®

Un trattamento ogni 48 ore

“ La Tecnica ZERONA®

- ✓ I pori transitori che si aprono sulla parete dell'adipocita durante ogni trattamento rimangono aperti per *non più di 72 ore*
- ✓ I pori devono restare aperti per oltre 14 giorni ... per permettere ai processi endogeni di detossificazione dell'organismo di mobilizzare fluidi verso lo spazio interstiziale
- ✓ Successivamente, il grasso viene smaltito attraverso il sistema linfatico nel corso del normale processo di rimozione delle tossine
- ✓ Il Processo continua per tutta la settimana successiva al termine dei trattamenti

È così semplice...

Come ottimizzare i trattamenti ZERONA®

Protocollo di Trattamento



“ La Tecnica ZERONA®

- ✓ Preparare il sistema linfatico e circolatorio una settimana prima di iniziare il ciclo di trattamenti
- ✓ *I cicli possono essere di 6, 9 o 12* trattamenti da 40 minuti ciascuno
- ✓ 20 minuti sulla parte anteriore e 20 minuti posteriore
- ✓ A giorni alterni per 2 settimane *imperativo per i migliori risultati*

La Garanzia ZERONA®

- ✓ Al controllo dopo il 6° trattamento, se il paziente non ottiene minimo 8 cm di perdita cumulativa, continuare i trattamenti per un'altra settimana per altre 3 volte
- ✓ Questo aiuta le persone con un metabolismo più lento ad ottenere i risultati ottimali
- ✓ Per i pazienti che ottengono una riduzione di 8 cm, continuare il protocollo e farli tornare per il controllo finale una settimana dopo



È così semplice...

Come ottimizzare i trattamenti ZERONA®

Posizionamento dei Laser

- “ È indispensabile conoscere il posizionamento corretto di ogni diodo per ogni area di trattamento
 - Non più di 20 centimetri da ciascun diodo all'area di trattamento, più vicino è meglio.
 - Utilizzare il centro del diodo come guida per il posizionamento sull'area più morbida di adipe sottocutanea.
 - Regolare i bracci del laser sulle aree di accumulo di grasso più morbido nelle zone di trattamento delineate
 - I raggi laser adiacenti DEVONO sovrapporsi, le teste dei laser devono essere parallele alla pelle



È così semplice...